

*Happy End*

мини микроскоп



## **Мини-микроскоп *Happy End***

Для ранней диагностики беременности является индивидуальным диагностическим средством для быстрого, без вмешательства в организм и проведения каких-либо специальных анализов, определения наличия беременности, а также благоприятных и неблагоприятных для зачатия дней в женском менструальном цикле с точностью 98%.

Принцип действия прибора основан на изменении физических свойств слюны в зависимости от содержания в ней эстрогенов и солей, что напрямую связано с наличием половых гормонов в организме женщины. Это обстоятельство дает принципиально различный вид высохшего образца пробы слюны, четко различимый при определенном увеличении: в благоприятные для зачатия дни - это линейно-штриховая структура, напоминающая по форме листья папоротника; в неблагоприятные - точкообразная структура, не имеющая линий и штрихов. Отсутствие "папоротниковой" структуры в обычные для ее появления дни цикла свидетельствует о наличии беременности. "Папоротниковая" структура начинает появляться за трое-четверо суток до овуляции, а исчезает через двое-трое после нее.

Конструктивно мини-микроскоп выполнен в виде тюбика губной помады, предельно прост в обращении в любых обстоятельствах, не требует специальных знаний и навыков, не оказывает никакого влияния на организм.

### **С помощью мини-микроскопа можно:**

- - избежать нежелательной беременности. В период появления "листьев папоротника" (см.рис.3) в анализе слюны следует применять

противозачаточные средства или избегать половых контактов. "Точкаобразная" структура анализа означает- надежный период (см. рис.1). Кроме четкого изображения "точко-образной" или "папоротниковой" структур в определенный период времени можно видеть, что "папоротниковая" структура заполняет лишь часть видимого в мини-микроскоп поля или неясно различима. Это означает, что в данный момент "переходный период" (см. рис.2), который, если хотите избежать нежелательной беременности, считается "ненадежным периодом", не следует отказываться от противозачаточных средств;

- - определить наиболее благоприятное время для планирования потомства (В период "папоротниковой" структуры анализа слюны (см.рис.3);
- - определить наличие беременности по отсутствию "папоротниковой" структуры в те дни цикла, когда она обычно начинает появляться. При этом постоянно наблюдается структура, показанная на рис.3.

## Примечания и рекомендации

1. На результаты анализа слюны могут



Рис.1  
Неблагоприятный  
период



Рис.2  
Переходный период


влиять негативно (т.е. искажать его результаты):  
остатки пищи на зубах, курение, употребление спиртного непосредственно перед анализом.  
Поэтому рекомендуется воздержаться от еды, курения и употребления спиртного за два часа до анализа.

2. Воспаление полости рта и горла (ангина и т.д.) искажает результаты анализа, способствуя появлению "папоротниковой" структуры даже в период, не благоприятный для зачатия.
3. Перед каждым применением мини-микроскопа необходимо хорошо очистить предметное стекло для нанесения нового образца слюны (желательно проверить отсутствие изображения без нанесения нового образца слюны), советуем защищать мини-микроскоп от пыли, влаги и высоких температур, а также ударов и длительной тряски.
4. При несоблюдении указанных рекомендаций изготовитель не несет ответственности за результаты анализа. В случае сомнений и неуверенности в результатах анализа следует обращаться к врачу гинекологу.



Рис.3  
Благоприятный  
период

# Порядок работы

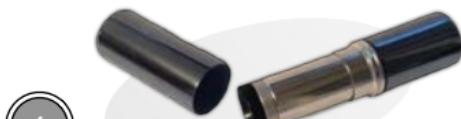

1

Снять верхний колпачек



2

Вынуть объектив



3

Очистить предметное стекло с помощью ваты, салфетки или носового платка, слегка смочив их спиртом, одеколоном или водой;

4

Нанести каплю слюны на сухое чистое предметное стекло языком или пальцем;



5

Дать высохнуть слюне в течение 5-10 минут.  
Установить объектив до упора без усилия. Настроить изображение – вращая регулировочное кольцо.  
Включение подсветки автоматическое

## **Замена элементов питания**

- Снять нижний колпачок, отвинтить резьбовое кольцо;
- осторожно вынуть элементы питания;
- установить новые элементы питания и собрать прибор в обратном порядке.

## **Технические характеристики**

- увеличение объектива: 50 крат
- разрешающая способность объектива 100 линий/мм
- освещение: светодиод.
- питание : 2 элемента по 1,5В( типа LR-44)

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи( исключая элементы питания). Изготовитель осуществляет безвозмездный ремонт изделия в течении гарантийного срока, если не нарушены правила пользования, транспортировки и хранения.